

Update

Wie der DichoTrainer, lässt sich der DichoTrainer PROFI updaten. Dadurch kann das Programm, welches im Gerät läuft, verändert, „ge-updated“ werden, also mit einem neuen, verbesserten Programm beschrieben werden.

Sie haben immer die Möglichkeit, wieder auf die alte Version zurück zu „updaten“.

Dazu ist auf dem USB Stick ein Ordner namens „update“ vorhanden. In diesen Ordner können Sie eine Update Datei kopieren, die Sie aus dem Internet von der AUDIVA Seite www.Dichotrainer.de kostenfrei beziehen können.

Update Datei beziehen

Während der USB Stick im PC steckt, können Sie aus dem Internet eine „Update-Datei“ auf dem USB Stick im Ordner AUDIVA/DP/Update speichern. Diese Datei kennzeichnet sich dadurch, dass sie folgenden Namen hat: z.B.: DTP_V214_Dt_out.Bin

- DTP steht für DichoTrainer PROFI (nicht mit DT verwechseln)
- V214 steht für die Version, die dann beim Einschalten kurz im Display angezeigt wird.
- Dt steht für die Sprache (Dt=Deutsch, En=Englisch)
- out steht für eine geprüfte Version, die für Kunden freigegeben ist (sonst stünde Test dort)
- Bin ist immer die Endung für Update-Dateien.

Die Größe beträgt immer genau 34.816 Byte (34KB).

Sind diese Eigenschaften erfüllt, handelt es sich mit Sicherheit um keine Fremddatei und keinen Virus. Falls Ihr Anti Virus System meckert, prüfen Sie bitte die oben genannten Daten. Da es sich um eine binäre Datei handelt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es Fehlalarm gibt.

Update ausführen

Den Stick wieder an den DichoTrainer PROFI stecken.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um in den Updater zu gelangen:

1. vor dem Einschalten die Taste rechts unten gedrückt halten, bis USB Stick... im Display steht. Dann folgen die Erklärungen und Sie sehen die verfügbaren Update Dateien in der unteren Zeile. Wählen Sie die Datei mit den Tasten unten links/rechts aus und starten das Update mit der mittleren Taste. Nach wenigen Sekunden steht „Update erfolgreich“ im Display. Drücken Sie nochmals die mittlere Taste und das Gerät startet neu.

2. beim eingeschaltetem Gerät (jedoch nicht in einem laufenden Spiel) beide Tasten links/rechts unten gleichzeitig drücken. Es erscheint das Spezialmenü:

Spezialmenü

Verriegelung: In der Mitte der zweiten Zeile steht die aktuelle Einstellung NEIN/JA.	Gerät verriegelt <nein NEIN ja>	> drücken Sie oben rechts und es folgt „Updater starten?“.
Updater starten In der Mitte der zweiten Zeile steht die aktuelle Einstellung NEIN/JA.	Updater starten? <nein NEIN ja>	> Updater starten: Drücken Sie unten rechts, so dass „JA“ in der Mitte steht und dann die mittlere Taste. > nichts verändern: nur mittlere Taste drücken, wenn „NEIN“ in der Mitte steht. > Wenn Sie oben rechts drücken, folgt das „zeige Levelwerte“ Menü.

Wählen Sie mit links/rechts unten NEIN/JA und bestätigen Sie mit der mittleren Taste. Dann geht es weiter, wie bei 1. beschrieben.