

Vorbereitungen am AufmerksamkeitsTestgerät

- Maustaster links einstecken
- Kopfhörer hinten bei "Kopfhörer" einstecken
- Erhebungsbogen bereitlegen
- Gerät einschalten mit "Start/Stop" (Gerät initialisiert sich, es steht "Testmode: Vigilanz-Test")

Wir führen jetzt einen zweistufigen Test durch.

Das ist die standardisierte Testung:

- 1. auditive Aufmerksamkeit
- 2. auditive + visuelle Aufmerksamkeit mit akustischen Lärmszenen als Ablenkung

Es gibt auch eine individuelle Testung.

Zum Umschalten dient die Taste „Update“. Diese drücken Sie von hinten mit einem Stift.

Beim Lösen der Taste erscheint kurz die Anzeige:

- standardisierte Testung

oder

- individuelle Testung

Dies ist die gewählte Testung.

Stellen Sie standardisierte Testung ein.

Auf den folgenden Seiten die Kurzanleitung:

	Hinweise:	Am Gerät angezeigt:	Bedienung:
1	Einschalten: mittlere Taste drücken.	Testmode: Vigilanz-Test	oben rechts drücken
2	Wird nur gezeigt, wenn eine frühere Testung im Speicher des Gerätes ist.	Auswahl: Test> Auswertung>	oben rechts drücken
3	Wählen Sie je nach Alter die Testlänge.	Testdauer: 3 Min. 4-6 Jahre oder 8 Min. ab 7 Jahre	oben rechts drücken (Tasten unten links/rechts schalten um.)
4a	Gerät spielt die Testsilben erstmals vor.	efe - imi - ata - obe Klänge zu laut?	warten oder unterbrechen mit oben rechts
4b	Falls zu laut, leiser stellen. Falls zu leise, lauter stellen.	Lautstärke OK> <leiser lauter>	oben rechts drücken (Tasten unten links/rechts schalten um)
5	Gerät spricht Anleitung vor. (Proband hört diese über Kopfhörer)	Einweisung vorsprechen...	warten, dann automatisch weiter...
6	Prüfen Sie das Aufgabenverständnis:	Test verstanden?	automatisch weiter...
6a	Beobachten Sie das Display. Hat der Proband die Aufgabe verstanden? P=1,50/2,00/2,50 Sek. ist die Pausenzeit zwischen den Reizen. Es werden 8 Reize vorgespielt (7...0) T=Testreiz erklingt, P=Antwortzeit	efe - imi - ata - obe P=1,50Sek. 7...0 T/P Gerät zeigt Ohr!---- nach „imi“ Auge! --- nach Licht und OK! , wenn Maustaste gedrückt wurde.	warten oder unterbrechen mit oben rechts (Tasten unten links/rechts schalten Pause „P=...Sek.“ zwischen 1,50/2,00/2,50 Sek. um)
6b	wenn verstanden: folgt der Teststart > 7 wenn unsicher: erfolgen Wiederholungen > 6 wenn kein Verständnis: Wird der Test abgebrochen > 2 Sie erklären den Test und bemühen sich um das Aufgabenverständnis.	Test verstanden> <WDH abbruch>	wenn verstanden: oben rechts drücken wenn unsicher: unten links WDH=Wiederholen drücken wenn kein Verständnis: unten rechts drücken - Test nicht möglich.
7	Gerät weist darauf hin, die Testnummer zu notieren.	Bitte notieren: Test Nr. ...	automatisch weiter...
7a	Notieren Sie die Testnummer und fahren Sie fort.	Test starten> Test Nr. ...	Teststart: oben rechts drücken (Taste oben links bricht ab)
8	Test läuft ... keine Fragen des Probanden beantworten. Sie verhalten sich passiv.	Anzeige wie 6a	(Abbrechen mit mittlerer Taste möglich)

9	Nach Testende (1. Test) soll der zweite Test gestartet werden:	start 2. Test >	Teststart 2. Test: oben rechts drücken
10	Gerät spricht Anleitung vor. (Proband hört diese über Kopfhörer)	Einweisung vorsprechen...	warten, dann automatisch weiter...
11	Gerät prüft Aufgabenverständnis: Jetzt soll die Taste auf „imi“ und Lichtsignal gedrückt werden.	Test verstanden? Wie 6, 6a und 6b	Wie 6, 6a und 6b
12	Gerät weist darauf hin, die Testnummer zu notieren.	Bitte notieren: Test Nr. ... Wie 7, 7a	Wie 7, 7a
13	2. Test läuft ... keine Fragen des Probanden beantworten. Sie verhalten sich passiv. Womöglich wundert sich das Kind über die Geräusche, die es hört. Nicht darauf reagieren.	Wie 8	Wie 8
14	Nach Testende (2. Test):	2. Test beendet > Auswertung >	Taste oben rechts drücken: Gerät initialisiert sich neu und ist bereit für den nächsten Probanden oder für Datenübertragung zum PC. Taste unten rechts drücken: Auswertung im Display anzeigen.
<p>Die Testergebnisse befinden sich jetzt im Speicher des Gerätes. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC, um die Testdaten auszulesen.</p>			