



BrainFit


Training der Gehirnfunktionen über Hör- und Sehspele für Kinder und Erwachsene.

Training der Hör- und Sehverarbeitung.

Diagnostik der Hör- und Sehverarbeitung.



BrainFit Modelle: BrainFit Home, Play und Easy

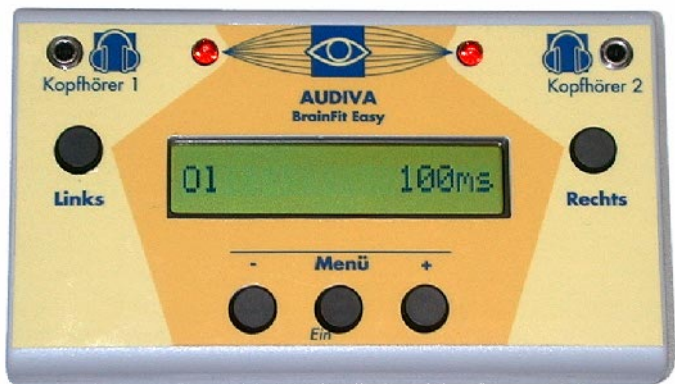

Alle **BrainFit** Modelle mit zwei Kopfhöreranschlüssen und 5 Tasten Bedienung

Seit über 15 Jahren entwickeln wir Geräte zum Testen und Trainieren der Low Level Funktionen der Hör- und Sehverarbeitung. Unsere BrainFit Geräte zeichnen sich durch eine Vielzahl von Funktionen aus.

So haben wir ein Spiel entwickelt mit 4 verschiedenen Schwierigkeitsstufen Beginner - Könner - Profi - Meister. Die Spieler sammeln Punkte. Dies motiviert Kinder wie auch Erwachsene und lässt einen Vergleich mit sich selbst oder anderen zu. Dieses Spiel finden Sie im BrainFit Home und Play.

Der BrainFit übt das genaue Hinhören oder Hinsehen. Fähigkeiten, die bei Teilleistungsstörungen, wie in der AVWS oder LRS-Therapie von großer Relevanz sind.

Im BrainFit Home können Sie gezielt aus 13 Low-Level-Funktionen auswählen und einzeln testen oder trainieren.

Die AUDIVA BrainFit Geräte sind günstig in der Anschaffung bei hohem Leistungsspektrum. Wir bieten außerdem einen wochenweisen Verleih mit Kaufoption an.

Wir bieten Ihnen drei verschiedene Ausführungen an, aus denen Sie je nach Ihrem persönlichen diagnostischen und/oder therapeutischen Bedarf wählen können:
BrainFit Home • BrainFit Play • BrainFit Easy

Die BrainFit Modellreihe mit neuen und bewährten Funktionen (gilt für alle drei Modelle):

- **liegt flach auf, z.B. in der Aphasietherapie auch einhändig bedienbar**
- **handlich durch abgerundete Seitenformen**
- **sparsam im Energieverbrauch**
Batterien halten ca. 6 Monate (je nach Benutzungsintensität) - wer möchte, kann auch Akkus einsetzen.
- **auch für 2 Personen geeignet**
durch zwei Kopfhörer-Anschlüsse können zwei Personen gleichzeitig hören.
- **Lautstärke links/rechts anpassbar**
für links und rechts einzeln einstellbare Lautstärke
- **unterstützt symmetrischen visuellen Fokus**
Der Blick des Benutzers wird durch die symmetrische Gestaltung des Geräts und den optischen Fixpunkt (in Form des Auges) bei allen visuellen Übungen in die Mitte geleitet. Die Lichtsignale können durch den großen Abstand (5 cm) getrennt wahrgenommen werden.
- **auch bei motorischen Überkreuz-Problemen geeignet**
Durch das Querformat und den Tastenabstand von rund 10 cm (links-rechts) werden motorische Unsicherheiten bei Zweihand-Bedienung vermindert.
- **Anzeige statistischer Werte**
Abruf der Trainingszeit und Häufigkeit des Trainings.
Zur Kontrolle der Gerätebenutzung.
- **Inkl. Protokollbogen zur Erfassung der Entwicklung**

Im Lieferumfang JEWELS enthalten:

- 1 BrainFit-Gerät (Abmessungen: 12,2 x 7,2 cm, Höhe 2,3 cm) 3 Batterien (eingesetzt)
- 1 Kopfhörer (2 Kopfhörer anschließbar)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Protokollbogen als Kopiervorlage
- 1 **Norm- und Vergleichswertliste** (für Kinder und teils für Erwachsene)

Alle Modelle sind sofort lieferbar!

BrainFit Home

Der BrainFit Home eignet sich sowohl zum Testen auditiver und visueller Funktionen, als auch zum spielerischen Training (enthält BrainFit Play).



Testen: wählbarer Startwert • Wahl der Reizarten visuell/auditiv (einzeln, gemeinsam, abwechselnd) • automatischer Stopp oder endlos • Wiederholungsfunktion • Lautstärke links/rechts einzeln einstellbar • positive Rückmeldung per Lichtsignal (abschaltbar).

Test-Auswertung: Bestwert, laterale Verteilung (z.B. 85% links und 60% rechts richtig), Anzahl Wiederholungen, Antwortlatenz im Durchschnitt; wird für alle Funktionen separat angezeigt und gespeichert. Mittels unserer Normwertliste kann eine Einstufung in auffällig/pathologisch bzw. unauffällig vorgenommen werden (siehe S. 6).

Spielen: siehe BrainFit Play

Bestell-Bez.: BF 4000	BrainFit Home	EUR 129,00
Verleih: BF 4000	Kaution: 50 EUR	EUR 5,00 / Woche

BrainFit Play

Spielen und trainieren:

Spielablauf mit Konzept: Pluspunkte bei richtiger, Minuspunkte bei falscher Antwort. Alle Übungen dauern jeweils eine


Minute (beliebig wiederholbar). Die 4 Schwierigkeitsstufen Beginner-Könnler-Profi-Meister unterscheiden sich in unterschiedlichen Startwerten bei der auditiven Ordnungsschwelle, z.B. 500/250/100/50 ms. Das Ziel ist, den Startwert innerhalb einer Minute auf die Hälfte zu reduzieren. Wer es früher schafft, bekommt noch extra Zeitpunkte!



Bestell-Bez.: BF play	BrainFit Play	EUR 79,00
Verleih: BF play	Kaution: 25 EUR	EUR 3,00 / Woche

BrainFit Easy

Wer nur mit der Ordnungsschwelle arbeiten möchte, ist mit dem BrainFit Easy bestens ausgestattet. Das Modell kann individuell eingestellt werden und

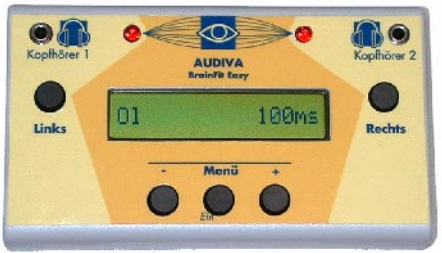

verfügt über eine statistische Auswertungsfunktion, die seinen Einsatz in der Diagnostik optimiert. Es startet nach dem Einschalten automatisch mit dem Training.

- **Ordnungsschwelle** auditiv (Kopfhörer) / visuell (Leuchtdioden)
- **Ordnungsschwelle** wird approximativ (nach 10 korrekten Reaktionen) oder prozentual (nach jeder Reaktion) angepasst (einstellbar).
- **Testauswertung:** Bestwert in ms zum Eintragen in Protokollbogen, sowie laterale Verteilung (z.B. 85% links und 60% rechts richtig), Anzahl Wiederholungen, Antwortlatenz im Durchschnitt
- Zeitbereich 1 bis 999 ms • wählbarer Startwert bei 50 bis 950 ms in 50 ms Schritten

Bestell-Bez.: OT 4000	BrainFit Easy	EUR 69,00
Verleih: OT 4000	Kaution: 25 EUR	EUR 2,50 / Woche



	Brain-Fit Home	Brain-Fit Play	Brain-Fit Easy
Ordnungsschwelle auditiv: (Seitenordnung nach Fischer) Klick links/rechts zuerst? *	ja	ja	ja
Ordnungsschwelle visuell: (Seitenordnung nach Fischer) Lichtsignal links/rechts zuerst? *	ja	-	ja
Ordnungsschwelle seriell: (Zeitordnung nach Fischer) Klick oder Ton zuerst? *	ja	ja	-
Fusionsschwelle auditiv Ein oder zwei Klicks?	ja	ja	-
Fusionsschwelle visuell Ein oder zwei Lichtsignale?	ja	-	-
Intermodalität Ton-/Lichtsignal zuerst?	ja	ja	ja
Tonhöhenunterscheidung Zwei Töne: hoch/tief zuerst? *	ja	ja	-
Tonhöhenunterscheidung Zwei Töne: gleich/ungleich?	ja	-	-
Richtungshören (auditiv) Klick links oder rechts? *	ja	ja	-
Synchronität/Fingertapping auditiv Klick links/rechts motorisch imitieren *	ja	ja	-
Synchronität/Fingertapping visuell Lichtsignal links/rechts motorisch imitieren	ja	-	-
Mustererkennung auditiv Welcher der 3 Töne war länger ? *	ja	-	-
Mustererkennung auditiv Welcher der 3 Töne war höher ? *	ja	ja	-

* Norm- und Vergleichswerte werden mitgeliefert.

Bestellung Kauf **EUR**

Stück	Kaufartikel	Bestell-Bez.	Einzelpreis	Ges.preis
-------	-------------	--------------	-------------	-----------

BrainFit Bestellung

Rabatte: 2 Stk.: 5% • 3 Stk. 7,5 % • ab 4 Stk. 10%

	BrainFit Home	BF 4000	129,00	
	BrainFit Play	BF play	79,00	
	BrainFit Easy	OT 4000	69,00	

Optionales Zubehör

	Ersatzbatterien (3 Stück)	BATL 3	4,00	
	Ersatzkopfhörer/Zusatzkopfhörer	KHE 3000	4,90	

Sonstiges:

BrainFit Verleih-Bestellung (per Bankeinzug)

Wochen	Leihgerät (jew. ein Gerät pro Modell)	Bestell-Bez.	Wochenpreis Kaution
	BrainFit Home	BF 4000	5,00
	Die Kaution ist einmalig pro Gerät und wird nach Rückgabe auf Ihr Konto zurückbezahlt.		50,00
	BrainFit Play	BF play	3,00
	Die Kaution ist einmalig pro Gerät und wird nach Rückgabe auf Ihr Konto zurückbezahlt.		25,00
	BrainFit Easy	BF easy	2,50
	Die Kaution ist einmalig pro Gerät und wird nach Rückgabe auf Ihr Konto zurückbezahlt.		25,00

Versand- und Bearbeitungskosten

Einmalige Bearbeitungsgebühr (nur bei Verleih)	10,00
Versandkosten (bei Kauf und Verleih)	5,00
Gesamtbetrag:	

Hiermit bestelle ich oben aufgeführte Artikel per:

- Bankeinzug (Immer bei Verleih) (abzügl. 3% Skonto auf Kaufartikel)
- Nachnahme (zuzügl. 6 EUR Gebühr)
- Rechnung, bei Angabe der Kundennr.: _____

Telefonische Beratung und Verleih-/Kaufbestellung:

Mo-Do von 9-18 Uhr und Fr von 9-13 Uhr

Tel.: +49/0-7626-9779-0

Fax: +49/0-7626-9779-11

E-Mail: order@audiva.de

Rechnungs- und Lieferadresse

Eine abweichende Lieferadresse bitte auf separatem Blatt angeben

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel. / Handy:

Fax:

E-Mail:

Liefertermin: sofort zum:

Ich habe die Bedingungen auf den vorherigen Seiten gelesen und erkläre mich mit der beschriebenen Vorgehensweise für den Verleih und mit den Vertragsbedingungen einverstanden.

Datum:

Unterschrift:

Arzt/Therapeut: Name und Ort (optionale Angabe):

Einzugsermächtigung

Immer bei Verleih erforderlich bzw. bei Zahlungsweise Bankeinzug

Kontoinhaber:

Name der Bank:

BLZ:

Kontonummer:

Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass mein Konto die Deckung für den Gesamtbetrag aufweist.

Unterschrift Kontoinhaber: