

# Hörwahrnehmungstrainer HWT Standard klein und sympatisch

## Grundfunktionen Level 1 bis 6 für Musiktherapie (Phase A) und Sprachtherapie, Lesetraining (Phase B)

Einfachste Bedienung für wichtigste Funktionen ist unsere Motivation für den bislang kleinsten Hörwahrnehmungstrainer.

Die eingebauten Trainingsprogramme von Level 1 bis Level 6 sind über den handlichen Drehschalter bequem einstellbar. Von Level 1 zu Level 6 ist jeweils eine Steigerung der Hochton- und Lateralbewegung integriert.

Die Hörlautstärke in Phase A (Musiktherapie) wird über den Lautstärkeregler am CD-Player oder Discman reguliert, in Phase B (Sprach- und Lesetraining) wird die Mikrofonlautstärke über den Drehknopf „Mikrofon Lautstärke“ am HWT standard eingestellt.

### Zubehör

- 1 Mikrofon (extra zu bestellen, nur für Phase B erforderlich)
- 1 oder 2 Kopfhörer (extra zu bestellen, immer erforderlich)
- CD Player/Discman (extra zu bestellen, immer erforderlich)

### Anwendung:

Der HWT standard ist die beste Lösung für

- das Training zu Hause über unser Verleihsystem oder von der Praxis aus, wenn einfachste Bedienung der wichtigsten Trainingsanwendungen gewünscht ist.
- die LRS-Therapie in Schulen oder Fördereinrichtungen bei geringsten Aufwand und einfachster Bedienung
- Erwachsene, die ihr Hörvermögen durch Gehör-Fitnesstraining unterstützen wollen.

### Leistungen:

- 6 automatische Abläufe für abwechslungsreiches Training (Level 1 bis 6 endlos - ohne Zeitbegrenzung, nach dem Vorbild vom HWT home/praxis)
- Sicherheitsfunktion: Abschalten des Kopfhörers bei zu lautem Schall (z.B. Schrei ins Mikrofon)
- Lateraltraining: Klangbewegung von einem zum anderen Ohr: langsam bei Level 1, schneller werdend bis Level 6
- Hochtontraining: Frequenzerhöhung und Verstärkung: gering bei Level 1, höher werdend bis Level 6

### Lieferumfang:

HWT standard, Steckernetzgerät 9V stabilisiert, Verbindungskabel zum CD-Player/Discman, Bedienungsanleitung, Trainingsplan und Feedbackformular.

Abmessungen: 12,2 x 7,2 cm, Höhe 2,3 cm • Preis: 290 EUR (Verkauf) bzw. 10 EUR/Woche (Verleih)



Der HWT standard in der Musiktherapie mit Discman, CD-Set (AMC S5) und Kopfhörer (QP 160).



Der HWT standard - eindeutige Steckverbindungen, einfache Bedienung - alles von oben.



Hier finden Sie Hinweise zu den Zubehöerteilen Kopfhörer, Musikmaterial und Discman/CD-Player/Anlage.

## CD-Player / Discman



**Discman** (tragbarer CD Spieler) sollte ohne Antishock sein - oder diese Funktion abschalten (vermindert die Qualität hoher Frequenzen).

Anschluss an eine **Musikanlage**:

Beim Einstecken des beiliegenden Verbindungskabels in die Kopfhörerbuchse der Anlage müssen die Lautsprecher ausgehen.

Achten Sie auf **Markengeräte** wie Panasonic, Sony, Grundig usw.

Die Lautstärke der Hörtherapie wird nur an dem Lautstärkereglern des Discman / der Anlage eingestellt!

Geben Sie zuviel Lautstärke, schaltet der HWT standard die Kopfhörer ab und es kommt ein Piepton aus dem Gehäuse des HWT standard, als Warnung.

Wir haben jeweils ein in unserem Labor bauartgeprüften tragbaren CD-Player / Discman auf Lager. Zur Zeit:  
CDP 108 zu 49 EUR.

## Kopfhörer - sehr wichtig!



Der Kopfhörer bringt den Klang nah ans Ohr, so dass der Klang im Kopf geortet wird und nicht außerhalb im Raum.

Eigenschaften:

- Polster, die das Ohr umschließen (nicht flach aufliegen)
- Durchlässig für Schall von außen (nicht abschirmend)
- Hoher Tragekomfort, leicht im Gewicht
- keine Ohrstecker verwenden!
- Technische Daten:  
Frequenzgang: bis mind. 20.000 Hz  
Klirrfaktor: unter 1 % (wenn nicht angegeben, nicht verwenden!)
- Grundsätzlich geeignete Hersteller:  
Sennheiser, MB Quart, Bayer Dynamic, AKG

Den QP 160 (MB-Quart) können Sie für 45,5 EUR bei uns erwerben.

## Musikmaterial - für Phase A (Musiktherapie)



Die Musik liefert den Klang, der unbedingt harmonisch sein muss, denn das HWT Gerät verstärkt durch seine Filterung die von der Musik ausgehende Wirkung auf unser Gehirn.

Eigenschaften:

- Mozart ist optimal
- Bach: nur die Violinkonzerte 1 bis 3
- Vivaldi: die Mandolinenkonzerte
- keine „Klassik für Kinder“
- keine anderen Komponisten (nur wenige Ausnahmen)
- keine Pop-, Rock-, Hip-Hop-, Rap- oder Schlagermusik
- keine Musik mit Synthesizer
- keine Schlaginstrumente

Wir empfehlen das 5er-Set AMC S5 zu 39 EUR

## Sprach- und Lesetraining

In unserer Broschüre „Hörwahrnehmungstraining zu Hause - Leitfaden für Eltern“ finden Sie

- Hörbücher - extra langsam und deutlich vorgelesen ab 3 Jahren bis etwa 12 Jahre
- Gedichte der deutschen Literaturgeschichte als Hörbuch für Jugendliche und Erwachsene
- Übungsordner für Kinder von Vorschule bis 8. Klasse für Therapie der phonologischen Bewusstheit bis LRS

| Bestellung Kauf   |   |                  | EUR  | EUR           |
|---|---|------------------|--|---------------|
| Stück   | Kaufartikel   | Bestell-Nr./Bez. | Einzelpreis  | Gesamtpreis   |
| <b>Für Phase A (sensorische Anregung über Musikhören)</b>   |   |                  |  |               |
|   | Hörwahrnehmungstrainer HWT standard                                       | HWT std          | 290,00   |               |
|   | Musik CD Set (musiktherapeutisch bewährte 5 CD's Mozart - Bach - Vivaldi) | AMC S5           | 39,00  |               |
|   | Discman (Bauartgeprüft nach AUDIVA Qualitätsvorgaben)                     | CDP 41           | 69,00  |               |
|   | Kopfhörer   | QP 160           | 45,50  |               |
| <b>Für Phase B (sprachliche Anregung über phonologische Übungen, Leseübungen, Sprechübungen)</b>  |   |                  |  |               |
|   | Mikrofon EM 104, mit passendem 3,5mm Klinkestecker                        | EM 104           | 30,00  |               |
|   | Tischständer für Mikrofon EM 104  | MS 1             | 6,90   |               |
|   | Ordner .....<br>Bitte nach Alter und Interessen aussuchen                 | TM .....         | .....  |               |
|   | Hörbücher: .....<br>Bitte nach Alter und Interessen aussuchen             | TM .....         | .....  |               |
| <b>Sonstiges: (Übertragen Sie einfach Bestellnr./-bez. und Preis von der Katalogseite)</b>  |   |                  |  |               |
|   |   |                  |  |               |
| <b>Bestellung Verleih</b>   |   |                  |  |               |
| Wochen  | Leihgerät   | Bestell-Nr./Bez. | Wochenpreis  | Kautionspreis |
|   | Hörwahrnehmungstrainer HWT standard im VERLEIH                            | HWT std          | 10,00  | <b>100,00</b> |
| Einmalige Bearbeitungsgebühr (10 EUR) bei Verleih   |   |                  | 10,00  |               |
| Versandkosten 5 EUR   |   |                  | Versandkosten:   | 5,00          |
| Hiermit bestelle ich oben aufgeführte Artikel per:  |   |                  | Gesamtbetrag:  |               |
| <input type="checkbox"/> Bankeinzug (abzügl. 3% Skonto auf Kaufartikel)<br><input type="checkbox"/> Vorauszahlung (Sie erhalten eine Vorausrechnung, Lieferung nach Zahlungseingang)<br><input type="checkbox"/> Nachnahme (zuzügl. 6 EUR Gebühr)<br><input type="checkbox"/> Rechnung, bei Angabe der Kundennr.: _____   |   |                  |  |               |
| Sicherheits- und technische Fragen. Bitte ankreuzen: Anwendung in der <input type="checkbox"/> Medizin, <input type="checkbox"/> Therapie, <input type="checkbox"/> Schule, <input type="checkbox"/> zu Hause, <input type="checkbox"/> andere _____ an Patienten mit <input type="checkbox"/> Bewegungsunfähigkeit, <input type="checkbox"/> Fehlen normaler Reaktionen. |   |                  |  |               |
| <b>Rechnungs- und Lieferadresse:</b>  |   |                  | <b>Einzugsermächtigung</b>   |               |
| Eine abweichende Lieferadresse bitte auf separatem Blatt angeben  |   |                  | Immer bei Verleih erforderlich bzw. bei Zahlungsweise Bankeinzug                                   |               |
| Anrede:   |   |                  | Kontoinhaber:  |               |
| Name:   |   |                  | Name der Bank:   |               |
| Straße:   |   |                  | BLZ:   |               |
| Land/PLZ/Ort:   |   |                  | Kontonummer:   |               |
| Tel.:   |   |                  | Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass mein Konto die Deckung für den Gesamtbetrag aufweist. |               |
| Fax (optional):   |   |                  | Unterschrift Kontoinhaber:   |               |
| eMail (optional):   |   |                  |  |               |
| Liefertermin: <input type="checkbox"/> sofort <input type="checkbox"/> zum: .....   |   |                  | Empfohlen von: (Name und Ort, optionale Angabe als Referenz):                                      |               |
| Ich habe die umseitigen Hinweise gelesen und erkläre mich mit den Bedingungen für Kauf/Verleih einverstanden.   |   |                  |  |               |
| Datum:  |   |                  | Unterschrift:  |               |

Wir empfehlen 12 Wochen Anwendung (verlängerbar) und mindestens 6 Wochen.

### **Rücksendung normal oder später**

Das Datum steht auf dem mitgelieferten Beleg. Bis zu diesem Datum nutzen Sie das Gerät. Den Werktag danach geben Sie es auf einen Lieferdienst. Sie zahlen das Rücksendepporto. Wir tolerieren 4 Werktage Verzug. Bei verspätetem Eintreffen bei uns wird wochenweise nachberechnet.

### **Rücksendung früher**

Zuviel bezahlte Verleihgebühr wird Ihnen wochenweise erstattet. Eine Rücksendung eines 12 Wochen Verleihs nach 10 Wochen führt zur Erstattung von 2 Wochen + Kautions.

### **Lieferung**

erfolgt innerhalb von 4 Werktagen oder Sie nennen uns einen Liefertermin. Die Berechnung beginnt ab Lieferdatum plus 4 Tage Zustelltoleranz zu Ihren Gunsten.

### **Umwandlung Verleih in Kauf / Anrechnung**

Entscheiden Sie sich innerhalb der ersten 6 Leihwochen für den Kauf eines AUDIVA Gerätes, wird die Verleihgebühr zu 100% auf den Kaufpreis angerechnet. Dazu genügt ein Anruf, eine Email oder ein Fax. Entscheiden Sie sich später, werden noch 50% der Verleihgebühr auf den Kaufpreis angerechnet. Der Verleih endet durch Rücksendung des Verleihgerätes, danach ist keine Anrechnung mehr möglich.

Sie können jedoch auch nach Verleihende mit uns verhandeln, in wieweit eine Anrechnung früherer Verleihgebühren auf den Kauf möglich ist.

### **Endabrechnung / Rückzahlung der Kautions**

Nach Eingang der Verleihgeräte bei uns überprüfen wir Geräte und Zubehör und erstellen eine Endabrechnung. Im Falle eines Guthabens überweisen wir Ihnen den Betrag auf Ihr Konto. Sie erhalten einen Beleg zum Einreichen bei Ihrer Krankenkasse oder für Ihre Steuerabrechnung (Lohnsteuerjahresausgleich). Bei Mängeln an den zurückgesandten Waren, die nicht durch den üblichen Verschleiß bei anwendungsgerechter Nutzung zu erklären sind, behalten wir uns vor, die beschädigten Teile oder deren Reparatur in Rechnung zu stellen.

Sollten **Störungen am Leihgerät** auftreten, müssen Sie sich sofort telefonisch bei uns melden. Das Gerät sollten Sie dabei zur Hand haben. Wir prüfen dann mit Ihnen gemeinsam, wie die Störung zu beheben ist. Falls erforderlich, senden wir Ihnen umgehend ein Ersatzgerät und Sie erhalten einen kostenfreien Zeitausgleich in der Verleihdauer.

### **Therapeutische Unterstützung**

Wenn Sie zu diesem Training fachlich betreut werden, holen Sie sich zunächst bei Ihrem Therapeuten weitere Informationen. Sollten Sie zusätzliche Informationen benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Vor allem dann, wenn Sie ein Hörwahrnehmungstraining ohne therapeutische Begleitung durchführen.

### **Trainingswirkungen**

Obwohl sehr rasche Erfolge möglich sind, kann dies nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden. Aufgrund der individuellen Wahrnehmungsprobleme der Betroffenen kann die Wirkung von sehr schnell bis sehr langsam eintreten. Sie sollten daher auf keinen Fall den Erfolg an einen bestimmten Zeitpunkt binden.

Um einen Trainingserfolg zu erkennen, lesen Sie im beigelegten Trainingsplan die Seiten zur Qualitätskontrolle. Treten Sie rechtzeitig (innerhalb der ersten 6 Wochen) mit uns oder Ihrem Therapeuten in Verbindung, um die Integration des Trainings in den Alltag zu optimieren. Wir beraten Sie gerne!

### **Reaktionen**

Beim Hörwahrnehmungstraining kann es in seltenen Fällen zu begleitenden Reaktionen (z.B. vorübergehender Unruhe) kommen. Diese können von kurzer Dauer sein und sich im weiteren Verlauf wieder legen. Setzen Sie sich ggf. mit Ihrem Therapeuten oder Arzt in Verbindung oder wenden Sie sich direkt an uns.

### **Haftung**

Bekanntermaßen kann zu lautes Hören zu Schädigungen des peripheren Hörens führen. Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Musik und Sprache gerade gut hörbar sind. Oft ist es so, dass im Verlauf der Trainingswochen die Lautstärke reduziert werden kann, weil sich das Gehör sensibilisiert.

Als Erziehungsberechtigter haften Sie für Ihre Kinder und haben damit auch die Pflicht, die Hörzeiten, die verwendete Musik, die Lautstärke sowie die Beschäftigung während des Hörwahrnehmungstrainings zu überwachen. Für Schäden, die aus der unsachgemäßen Benutzung der Geräte entstehen, können wir keinerlei Haftung übernehmen.

### **Eigentumsvorbehalt**

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum und darf nicht weiterveräußert werden.

**Telefonische Beratung und Verleih-/Kaufbestellung:** von 9-18 Uhr (Mo-Do) und 9-13 Uhr (Fr) - kostenfrei telefonieren innerhalb Deutschland (auch per Handy): 0800-9779 800. Normales Festnetz: +49/0-7626-9779-0  
Per Fax an 07626-9779-11.  
Per Email an [order@audiva.de](mailto:order@audiva.de)