

HörWahrnehmungsTraining für Erwachsene



Einfach zu Hause im Alltag integrieren

Hilfreich und unterstützend bei:

- Hörsturz
- Tinnitus
- Schwerhörigkeit
- Aphasie, Multiple Sklerose, Parkinson
- Demenz, Alzheimer
- Aufmerksamkeitsdefizite (ADS, ADHS)
- Sprach- und Sprechstörungen
- Hyperakusis (Geräuschempfindlichkeit)
- Depression
- Burn-out



2018+

Testen und gegen geringe Gebühr ausleihen!

Seit 1992 entwickelt Uwe Minning das AUDIVA® HörWahrnehmungsTraining, kurz HWT, welches von Therapeuten und Eltern sehr erfolgreich bei Kindern mit Entwicklungs-, Sprach- und Lernproblemen eingesetzt wird. Auch Erwachsene profitieren vom HWT, bei beginnender Schwerhörigkeit, Geräuschempfindlichkeit und stressbedingtem Tinnitus.

AUDIVA® kooperiert mit Universitäten, z. B. mit der Universität Oldenburg und unterstützt gerne Forschungsarbeiten zur HWT-Anwendung.

Was passiert beim HörWahrnehmungs-Training?

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Lärm die Gesundheit schädigt. Lärm belastet das psychische und vegetative System. So können Herz-Kreislauf-Probleme, Blutdruckerhöhung, Verringerung der Schlafentiefe sowie Kopfschmerzen entstehen. Psychologische Lärmauswirkungen erzeugen Stress. Der Körper schüttet im Lärm stetig Stresshormone aus und reagiert mit Nervosität, Niedergeschlagenheit, Störung von Kommunikation, Leistungsbeeinträchtigung und psychosomatischen Symptome.



Angenehme Musik und Naturgeräusche sind das Gegenteil von Lärm und lösen beim Hörer Empfindungen aus, die ausgleichend auf die oben genannten Probleme einwirken. So wird das HWT immer mit harmonischer Musik von Mozart, Bach und Vivaldi oder Naturgeräuschen durchgeführt. Schon der Pionier A. Tomatis wusste, dass Menschen über das Ohr Energie aufnehmen und zwar durch die hohen, hellen Klänge. Über das HWT-Gerät werden die hohen Klänge hervorgehoben und lateralisiert (links-rechts von Ohr zu Ohr bewegt) und über gute Kopfhörer übermittelt. Das HWT täglich 30 Minuten bei leichter Integration in den Alltag anwenden, da parallel gewohnte ruhige Tätigkeiten durchgeführt werden können!

Leihen oder Kaufen

Testen Sie das HWT! Wir empfehlen Ihnen unser Verleihsystem. Dadurch können Sie die HWT-Geräte für mind. 6. Wochen probieren. Konditionen finden Sie ab Seite 15.

Herstellung in Deutschland

Wir entwickeln und produzieren in Deutschland und sorgen für Arbeitsplätze. Die Rückmeldungen fließen stets in die Weiterentwicklung unserer Produkte mit ein. Unser Qualitätsmanagementsystem garantiert eine gleichbleibend hohe Produktqualität und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern.

Beratung

Wenn Sie Fragen zur Anwendung des HWT haben, stehen wir Ihnen zur Verfügung. Wir können Ihnen bundesweit Therapeuten nennen, die Erfahrung mit unserem HWT haben und Sie begleiten können. Rufen Sie uns einfach an.

Telefonisch sind wir von Montag bis Donnerstag (8:30 bis 16:30 Uhr) und am Freitag (8:30 bis 13 Uhr) für Sie erreichbar.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und viel Erfolg mit unserem Hörtraining!

Ihr Uwe Minning & das AUDIVA Team



AUDIVA, Hören und Bewegen

Uwe Minning
Behlenstraße 3
79400 Kandern-Holzen
Tel.: +49 (0) 7626 9779-0
Fax: +49 (0) 7626 9779-11
Email: info@audiva.de
Internet: www.audiva.de

+ Unsere Vertriebspartner im Ausland:


AUDIVA® in der Schweiz:

Gesundheitspraxis Verbena • Gisela Schnell Kocher
Rue des Martins 33 • CH - 2800 Delémont
Tel.: +41 (0) 78 951 0 913
Internet: www.gesundheitspraxisverbena.ch
Email: gsk@gesundheitspraxisverbena.ch
(Wir liefern in die Schweiz per DHL oder Abholung in Kandern)

== AUDIVA® Vertretungen in Österreich.

Siehe www.audiva.de/referenzen-adressen.html

Mit zunehmendem Alter nimmt die Hörfähigkeit ab. Besonders zwischen 40 und 60 Jahren ist der Verlust der Hörfähigkeit groß. Die nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf. Links sind die tiefen, rechts die hohen Töne. Oben zeigt die Linie bei 0 ein normales Hören. Je weiter die Linien nach unten abweichen, desto stärker der Hörverlust.

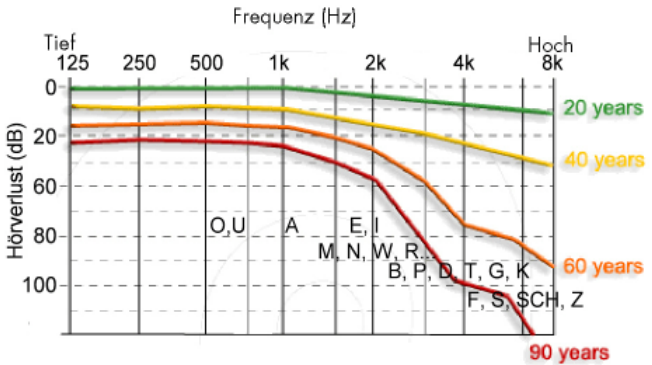

Dieses Nachlassen des Gehörs ist ein Phänomen unserer westlichen Gesellschaft, denn bei Urvölkern findet man auch im Alter ein gutes Hören hoher Frequenzen. Diese sind wesentlich für das Verstehen von Sprache, welches zwischen 1000 und 6000 Hz seinen Schwerpunkt hat. Der Verlust des Sprachverstehens führt zur Isolation von der Gesellschaft. Weitere Folgen können Alzheimer, Demenz und verschiedene Formen von Depressionen sein.

Bei einer Depression wird z.B. eine Lichttherapie empfohlen. Wieso kein HWT? Tragen doch die hohen und hellen Frequenzen z.B. einer Violine die meiste Energie und erreichen über das Ohr unser Innerstes.


Warten Sie nicht, bis der Arzt Schwerhörigkeit bestätigt!

Viele Ärzte kennen leider oft keine Methode, Ihr Hören zu verbessern. Oft wird abgewartet, bis es ohne Hörgerät nicht mehr geht. Dann haben Sie etwa 40-50 dB Verlust in den hohen Tönen. Bis etwa 50 dB Verlust können Sie mit unserem HWT gute Erfolge erzielen. Genauso wie die Muskeln und Gelenke im Körper regelmäßig trainiert werden wollen, verhält es sich auch mit den kleinsten Muskeln im Innen- und Mittelohr.

Das HWT fördert die Beweglichkeit der Hörmuskulatur und der Haarsinneszellen im Innenohr.

Wenden Sie das HWT mit einem unserer HWT-Geräten im Vergleich an, um die Wirkung selbst zu spüren.

Schon Dr. Alfred Tomatis (1920 - 2001, HNO-Arzt, Wissenschaftler, Psychologe und Erforscher der Zusammenhänge zwischen Ohr, Gehirn und Nervensystem) erkannte, dass über das Ohr durch hohe Frequenzen eine Aktivierung des Gehirns stattfindet. Deshalb werden beim AUDIVA® Hörtraining stufenweise die hohen, hellen Klänge verstärkt.

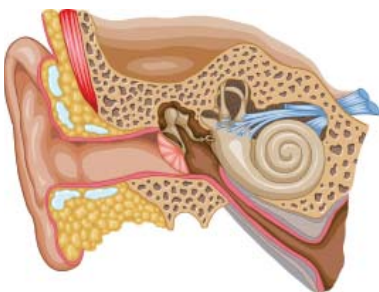

AUSGLEICH DER GEFÜHLS- UND STIMMUNGSLAGE

Der Hörsinn steuert besonders die menschlichen Stimmungen und Gefühle durch Neurotransmitter und Hormone. Das folgende Schema veranschaulicht diese Zusammenhänge.

Verarbeitung von Musik und Sprache



Die grüne Linien zeigen, dass durch die Verarbeitung des Hörsignals vom Cochlea über den Thalamus und Hypothalamus Neurotransmitter freigesetzt werden. Geräusche, Sprache, Musik - alles hinterlässt einen Gefühlsabdruck, der je nach Intensität mehr oder weniger lange anhält. AUDIVA® nutzt im HWT die Verarbeitungswege der Cochlea in die verschiedenen Hirnbereiche. Hören betrifft nicht nur sprachliches Verstehen (Diskrimination und Speicherung), sondern interagiert mit Aufmerksamkeit, Emotion und Motivation sowie vegetativen Reaktionen. Deshalb verwenden wir im HWT harmonische Musik von Mozart, Bach, Vivaldi und Naturklänge. Sie können durch unser HWT in eine angenehme Stimmung geführt werden.

Die geistige Fitness und Lärm:

Durch unsere immer offenen Ohren ist Lärm sofort Nervenaktivität. Der Lärm ist bereits in uns. Unser Filtersystem setzt unsere eigene Energie ein, um den Lärm vom Nutzschall herauszufiltern. Diese entgegengesetzte Aktivität, die wir selbst aufbringen müssen, macht müde und raubt Energie. Wenn unsere eigene Energie erschöpft ist, setzt Stress ein.


Unsere Hypothese: Durch das AUDIVA® HWT mit harmonischer Musik, gespielt auf natürlichen Instrumenten, nehmen wir über das Ohr Energie auf und werden leistungsfähiger.

So funktioniert das HörWahrnehmungs-Training (HWT)


Das HWT wirkt anregend auf die Gehör- und Gehirnfunktionen, indem die Musik vom HWT-Gerät speziell verändert wird: sie bewegt sich von Ohr zu Ohr und enthält weit mehr hohe Klänge.

Die HWT-Klangwirkung ist in der unteren Abbildung dargestellt. Sie sehen ein 30 Sekunden langen Musik-Ausschnitt.

linkes Ohr

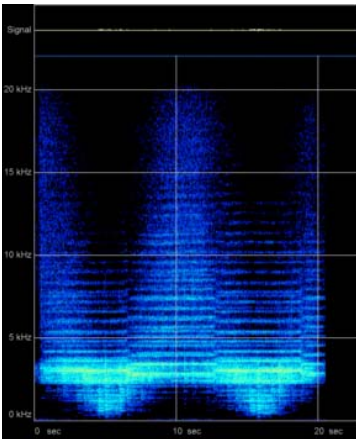

rechtes Ohr

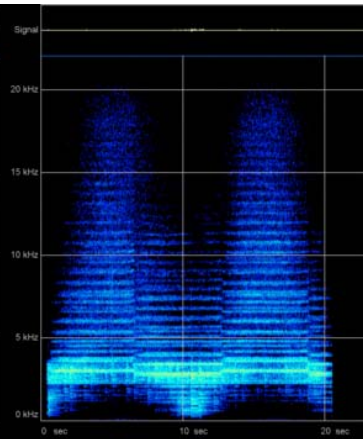

Sie erkennen:

- Die laterale (links-rechts) Bewegung der Musik, wenn Sie linkes und rechtes Ohr vergleichen.
- Das Fehlen von ganz tiefen Tönen, wenn Sie die Lücken unten ansehen.
- Das verstärkte Vorhandensein von hohen Klängen, wenn Sie die Ausstrahlung nach oben anschauen.

Mit dem HWT wird eine neue Struktur geprägt. Diese Struktur ist immer einmalig. Es gibt keine sich wiederholenden Muster. Das Gehirn gewöhnt sich somit nicht daran.

Wieso nicht einfach nur eine CD, iPod, Handy abspielen?

Das HWT-Gerät erzeugt neue Strukturen, die nicht auf den neuen Medien verlustfrei gespeichert werden können. Daher ist das Hören von CD-Player über das HWT-Gerät und Kopfhörer immer erforderlich. Zudem wird ein Aufbautraining durchgeführt, jeder Musiktitel wird mit verschiedenen Leveln von 1 bis 6 gehört.



Kopfhörer?

Das HWT wird immer mit Kopfhörern durchgeführt. Falls Sie eigene verwenden möchten, bitte nur Markenprodukte. Vermeiden Sie Ohrstecker oder Lautsprecher (Ausnahme: Naturschallwandler). Kopfhörer bringen den Klang direkt ans Ohr und das Klangerlebnis findet räumlich im Kopf statt (zwischen Ihren Ohren und nicht irgendwo außen).



Lautstärke?




Die Lautstärke stellen Sie selbst so gering ein, dass Sie die veränderte Musik gerade hören.

Knochenhörer?

Der Knochenhörer gibt die Musik in Form von feinen Vibrationen auf den Knochen wieder. Dieser leitet den Schall direkt ins Innenohr. Sie hören und fühlen gleichzeitig. Das HWT gewinnt an räumlicher Ausdehnung. Über das Fühlen erweitert sich die Trainingswirkung, da Sie einen weiteren Sinneskanal nutzen.

Am HWT spectrum/praxis direkt anschließbar!

In den Kopfbügel des Kopfhörers sind 2 Knochenhörer (stereo) bereits eingebaut.

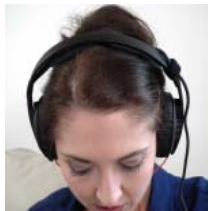

Kauf:	KHS 172	Kopfhörer mit 2 Knochenhörer	€ 299,00
Verleih:		Kaution: € 80,00	€ 8,00/Wo

... MIT DEM AUDIVA® HWT

Das tägliche Hörtraining wirkt stärkend und ausgleichend. Folgende Wirkungen sind möglich, durch Fallbeispiele belegt:

- Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit
- Ausgleich von beruflichem Stress
- Vorbeugung von Schwerhörigkeit, Hörsturz und Tinnitus
- Regeneration der Hörfähigkeit, sofern die Vitalität der Sinneszellen noch gegeben ist
- Stärkung Ihrer Abwehrkräfte durch positive Botenstoffe

Anwender und Therapeuten berichteten in Einzelfällen über Verbesserungen bei folgenden Fähigkeiten:

- Wahrnehmung von Naturgeräuschen (Wasser, Vogelgezwitscher) und hohen Frequenzen
- Wahrnehmung von Konsonanten und Zischlauten (hohe Frequenzen der Sprache)
- Gewappnet sein gegen laute Geräusche
- Wahrnehmung und Kontrolle der eigenen Stimme
- Ortung von Stimmen und Geräuschen im Raum
- Merkfähigkeit, Abrufen von gelerntem Wissen
- Lernen von Sprachen/Fremdsprachen

Wir weisen darauf hin, dass diese Wirkungen nach 20 Jahren Erfahrung möglich sind, jedoch nicht garantiert werden. Nutzen Sie unseren Verleih, für Ihre eigenen Erfahrungen!



Wie wird ein AUDIVA® HWT durchgeführt?

Das AUDIVA® HWT wird über das HWT-Gerät (HWT spectrum oder standard) und mit Kopfhörern durchgeführt. Wir bevorzugen Kopfhörer, die den Schall aus dem Raum durchlassen. So können Sie sich auch unterhalten während Sie die Kopfhörer tragen! Das Hörtraining wird nach einem strukturierten Trainingsplan zu fest eingeplanten Zeiten täglich oder auch flexibel, in jedem Fall kontinuierlich durchgeführt. Da die Wirkung auch bei leise eingestellter Musik gegeben ist, haben Sie viele Möglichkeiten der Integration in Ihren Alltag.

Ablauf des AUDIVA® HWT

10 Minuten oder 30 Minuten am Stück, zum Beispiel:

- morgens beim Aufwachen (sehr ergiebig für den Tag)
- beim Frühstück
- bei Schreib- oder Lesetätigkeiten (besonders leise eingestellt)
- bei Arbeit am PC
- bei Handarbeiten, handwerklichen o. kreativen Tätigkeiten
- beim Entspannen

WICHTIG:

Mindestens 30 Minuten täglich trainieren!

Ein Trainingsplan
liegt der Lieferung
bei.



Die Seele baumeln lassen!

Sie genießen schöne Musik, lassen die Klänge einfach wirken. Die Töne dürfen Ihr Herz berühren, Ihre Seele und Ihre Emotionen. Ihr Kopf muss nicht an der Musik arbeiten; er kann sich entspannen oder etwas ganz anderes tun. Vielleicht spüren Sie in Ihrem Innern eine Reaktion. Lassen Sie einfach zu, was passiert. Mag sein, dass in Ihnen etwas berührt wird, was Sie schon lange nicht mehr wahrgenommen hatten. Die Musik gibt Ihnen den Impuls vergessene Seiten an sich wahrzunehmen. Nehmen Sie diese Erfahrung mit Freude an. Die Musik und Naturklänge sind ein geschützter Raum für Sie.

Bei Depressionen

Das Gehirn produziert bei einer Depression nicht ausreichend Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin oder Noradrenalin. Diese Botenstoffe sind daran beteiligt, dass wir uns glücklich und wohl fühlen. Bei Depressionen werden Wiederaufnahmehemmer verschrieben, um das wenige Serotonin, Dopamin oder Noradrenalin länger im Gehirn aktiv zu halten. Unsere alternative Hypothese: Durch unser HWT kann Ihr Gehirn selbst genügend Neurotransmitter produzieren. Probieren Sie es einfach aus.



Bei Schwerhörigkeit

Durch unser HWT wird durch die laterale Bewegung von Ohr zu Ohr eine Anregung auf die Hör-Muskeln (im Mittelohr sitzen die kleinsten Muskeln des Körpers) und für die motorischen Haarsinneszellen (die äußeren Haarzellen arbeiten ähnlich wie Muskeln) erreicht. Die Art der von uns ausgewählten Musik vermittelt zusätzlich eine positive Stimmung.

Das wichtigste Merkmal des HWT ist die Hochtonfilterung. Es werden hohe Frequenzen (über 1000 Hz) verstärkt dem Ohr angeboten. Dies regt die Haarsinneszellen im Innenohr an und versorgt gleichzeitig die Hirnverarbeitung. Nur bei leichter bis mittlerer Schwerhörigkeit geeignet (bis max. 50dB Verlust).

Bei Tinnitus

Wie zuvor bei Schwerhörigkeit beschrieben, wird durch unser HWT eine spezielle Art von Massage erreicht, indem die hohen Frequenzen der Musik sich wechselseitig auf und ab bewegen. Dadurch findet eine stetige Anregung im Innenohr statt, wodurch ein Tinnitus zurückgehen kann. Besonders bei Tinnitus in Form von hohen Tönen oder helles Rauschen kann eine verbesserte Regulierung im Innenohr den Tinnitus zurückgehen lassen.

Wir gehen davon aus, dass jeder Tinnitus individuell ist, je nachdem wie lange er schon existiert, was seine Ursache war und wie stark er ist. Wir haben Rückmeldungen von gutem Erfolg bis zu keinem Erfolg. Deshalb bieten wir den Verleih an, damit Sie eigene Erfahrung sammeln können, ohne hohe Kosten zu haben.

Nach Hörsturz

Nach einem Hörsturz kann trotz medizinischer Versorgung eine Schwerhörigkeit oder ein Tinnitus zurückbleiben. Die anregende Wirkung des HWTs kann die Verbesserung der Hörsituation unterstützen.

Bei Aphasie

Im Gehirn ist die Verarbeitung von musikalischen Hörreizen und das Sprachzentrum eng miteinander verbunden, wie Studien zeigen. Sprachliche Fähigkeiten können durch Musik unterstützt werden.

Durch harmonische Musik und durch die anregende Wirkung des HWTs können folgende Effekte erreicht werden:

- ein entspannter Allgemeinzustand und positive Stimmung
- Verbesserung der Konzentration und Aufmerksamkeit
- Merkfähigkeit und Erinnerung stärken
- Hintergrundgeräusche werden als weniger störend wahrgenommen
- strukturelle Veränderungen und Bildung neuer Nervenzellen (Neuroplastizität)
- Aufbau des Körpertonus für motorische Rehabilitation (wichtig für den Aufbau der Muskeln für die Artikulation)
- Anregung beider Hirnhälften und Verbesserung ihrer Verschaltung (kommt der Motorik zu Gute)
- Verbesserung der Links-/Rechts- Koordination

Bei Demenz/Alzheimer

Hirnfunktionen „fit halten“. Hier wieder der Vergleich zum Muskelsystem: Muskeln bilden sich zurück, wenn körperliche Bewegung ausbleibt und verstärken sich wieder, wenn die körperliche Bewegung zunimmt.

Wenn das Gehirn bis ins hohe Alter stetig herausgefordert wird, kann der dementielle Abbau von Gedächtnisleistung aufgehalten werden und Hirnstrukturen beginnen wieder zu wachsen. Die Neubildung von Nervenzellen wurde wissenschaftlich im Alter beobachtet.

Das AUDIVA® HWT führt zu neuen Hörerfahrungen, unterstützt die Merkfähigkeit (Erinnerung) und ist eine gute Therapie für Demenz/Alzheimer.

Unsere bisherigen Anwender mit Demenz/Alzheimer sind hochzufrieden mit der Wirkung. Das Ohr ist das Tor zur Seele.

HWT spectrum



Mit integrierter Musik - Akkubetrieb - Oberton/Ultraschallgenerator - maximale Kabelfreiheit - 8 GB USB Stick:

- ca. 7 Stunden Mozart, Bach, Vivaldi
- ca. 1 Stunde Wasserklänge (Pfälzer Waldbach)
- ca. 20 Min. Katzenschnurren (besonders beruhigendes tiefes Schnurren. Gut über einen Knochenhörer spürbar!)
- Es stehen 8 Benutzer A...H zur Auswahl. Jeder Benutzer kann sich sein eigenes Hörprogramm zusammenstellen.
- Mit dem Wahlschalter sind 12 Hörprogramme wählbar.

Durch den integrierten Obertongenerator wird die Aktivität im Nervensystem erhöht („Hypersonic Effekt“).

Der HWT spectrum kann überall eingesetzt werden, dank Akkubetrieb (Doppelakku, 2x 1800 mAh umschaltbar).

Ausgänge: für 2 Stereo - Kopfhörer, 1 Stereo - Knochenhörer (3,5mm Klinkenbuchsen). Inkl. Ladeadapter für Netz und Auto sowie Trainingsplan und Bedienungsanleitung. Maße: 20,8 x 12,1 cm, Höhe 5,5 cm (mit Knöpfen),

Gewicht: 935 g, Alu, schwarz eloxiert.

Kauf:	HWT spec	Hörwahrnehmungstrainer	€ 689,00
Verleih:	V_HWT spec	Kauton: € 200,00	€ 20,00/Wo

Optimaler Kopfhörer (direkt anschliessbar):

In den Kopfbügel des Kopfhörers sind 2 Knochenhörer (stereo) eingebaut. Mit 1,5m Kabel und Verlängerung 5m, 2x3,5/6,3mm Klinkenstecker.



Kauf:	KHS 172	Kopfhörer mit Knochenhörer	€ 299,00
Verleih:	KHS 172	Kauton: € 80,00	€ 8,00/Wo

Ohne den Knochenhörer können Sie auch den Kopfhörer QP 160 auf Seite 13 verwenden.

HWT standard



Der HWT standard ist einfach zwischen einem tragbaren CD-Spieler und Kopfhörer zu schalten. Inklusive Verbindungskabel zum CD-Spieler, Netzadapter, Trainingsplan und Bedienungsanleitung. 3,5mm Stereo-Klinkenbuchsen.

Kauf:	HWT std	Hörwahrnehmungstrainer	€ 290,00
Verleih:	V_HWT std	Kaution: € 100,00	€ 10,00/Wo

Folgendes Zubehör wird benötigt:

Portabler CD-Player

Tragbarer CD-Spieler, abschaltbarer Anti-schock, 20-20.000 Hz, regelbarer Kopfhöreranschluss. Ein von AUDIVA® bauartgeprüftes Gerät.



Bestell-Nr.: CDP 114 nur Verkauf	€ 59,00
---	---------

Kopfhörer:

Wir empfehlen den seit über 15 Jahren bewährten QP160: nur 70 g leicht. Inkl. Verlängerungskabel: 6,2 m Bewegungsfreiheit. Super Frequenzgang bis über 26.000 Hz bei geringem Klirrfaktor (0,5 %).



Bestell-Nr.: QP 160 nur Verkauf	€ 59,00
--	---------

Musikauswahl für das HörWahrnehmungsTraining

Alle Titel auf den CDs haben eine beruhigende bis erhebende Wirkung auf das Gemüt, streicheln die Seele und geben Halt im Alltag. Diese positive Stimmung dem Leben gegenüber ist eine wichtige Säule der Wirkungsweise.



Bestell-Nr.: AMC-S5	Musik-CDs 1 - 5 (AUDIVA)	€ 59,00
Bestell-Nr.: AMC-S7	Musik-CDs 1 - 7 (AUDIVA) o. Abb.	€ 79,00

Was Sie immer beachten sollten:

- Das AUDIVA® HWT kann keinen **Arztbesuch** ersetzen, sondern unterstützt die Gesundheit durch Aktivierung der körpereigenen Kräfte.
- Es unterstützt bei psychosomatischen Erkrankungen, also wenn keine körperliche Ursache gefunden wird.
- Auch durch eine gesunde Ernährung können Sie Ihrem Hirnstoffwechsel genügend Ressourcen zur Verfügung stellen – denn Ihr Hirnstoffwechsel wird durch das HWT angeregt!

Wie kann ich Hörverbesserungen testen?

Sie werden durch Selbstbeobachtung die Wirkung des Hörtrainings spüren.

Wenn es um die **Hörfähigkeit** geht, lassen Sie bei Ihrem Hörgeräteakustiker Hörtests vorher und nach etwa 12 Wochen AUDIVA® HWT durchführen.

Wenn es um die **Hörverarbeitung** geht:

Testen Sie Ihre Hörverarbeitung einfach selbst - mit unserer Test CD für Erwachsene:



- **Flüsterstimme:**
Wie viele tiefe Frequenzen benötige ich, um Gesprochenes zu verstehen?
- **Schnellsprecher:**
Wie langsam muss man mit mir sprechen, damit ich es verstehen kann?
- **Zwei Ohren (beidohriges Hören):**
Kann ich differenziert auf dem linken und rechten Ohr hören? Kann ich mich auf zwei Sprecher aus verschiedenen Richtungen abwechselnd konzentrieren?
- **Lärm und Hören:**
Wörter verstehen, trotz Störschall als Stimmengemurmel.

Mit Punktesystem zur Auswertung.

Bestell-Nr.: **TCDE 10** nur Verkauf

€ 54,50

Einsenden oder per Fax an: (auch telefonische Beratung & Bestellung)
 AUDIVA Uwe Minning, Behlenstr. 3, D-79400 Kandern • Fax & Tel.: siehe unten
 (nächste Seite)

Bestellung				EUR
Stück/ Wochen	Artikel	Bestell-Bez.	Einzelpreis	Ges.preis
HWT Spectrum - im Verleih			Wochenpreis Kaution	
	Hörwahrnehmungstrainer HWT spectrum	HWT spec	20,00	
	Die Kaution ist einmalig pro Gerät *		200,00	
	Kopfhörer mit Stereo Knochenhörer	KHS 172	8,00	
	Die Kaution ist einmalig pro Gerät *		80,00	
HWT Spectrum - im Verkauf			Kaufpreis	
	Hörwahrnehmungstrainer HWT spectrum	HWT spec	689,00	
	Kopfhörer (sehr gute helle Klangqualität)	QP 160	59,00	
oder	Kopfhörer mit stereo Knochenhörer	KHS 172	299,00	
HWT standard - im Verleih			Wochenpreis Kaution	
	Hörwahrnehmungstrainer HWT standard	HWT std	10,00	
	Die Kaution ist einmalig pro Gerät *		100,00	
HWT standard - im Verkauf			Kaufpreis	
	Hörwahrnehmungstrainer HWT standard	HWT std	290,00	
HWT standard - Zubehör & Kopfhörer - nur Verkauf				
	Kopfhörer (sehr gute helle Klangqualität)	QP 160	59,00	
	5 CD Set Mozart, Bach, Vivaldi	AMC S5	59,00	
oder	7 CD Set Mozart, Bach, Vivaldi	AMC S7	79,00	
	CD Player mit regelbarer Lautstärke	CDP 114	59,00	
Einmalige Bearbeitungsgebühr (nur bei Verleih)			10,00	
Versandkosten (bei Kauf und Verleih)			5,00	
Gesamtbetrag:				
Hiermit bestelle ich oben aufgeführte Artikel per:				
<input type="checkbox"/> Bankeinzug (abzügl. 3% Skonto auf Kaufartikel)				
<input type="checkbox"/> Paypal (Zahlung an order@audiva.de)				
Sie haben ein Rückgaberecht von 3 Wochen und eine Garantie von 2 Jahren. Bei Verleih ist die Mindestleihdauer 6 Wochen. Die Verleihgebühr wird bei Umwandlung in Kauf von der 1. bis zur 6. Woche zu 100 % auf den Kaufpreis angerechnet, danach zu 50 % und nach Rückgabe des Verleihgerätes entfällt die Anrechnung. Zusätzlich erhalten Sie einen Rabatt von 10 %, wenn Ihr Verleihgerät zuvor schon verliehen wurde. Dies ist an der Seriennummer, die jedes unserer Geräte trägt und die bei jedem Vorgang automatisch bei uns erfasst wird, nachweisbar. Die Kaution erhalten Sie nach Rückgabe des Gerätes auf Ihr Konto zurücküberwiesen. Bei verfrühter Rückgabe erhalten Sie auch nicht genutzte Verleihwochen erstattet. Treten irgendwelche Störungen am Gerät auf, sind Sie verpflichtet bei uns anzurufen, bevor ein Reparaturvorgang beginnt. Ist die Störung eindeutig gerätebedingt, liefern wir Ihnen umgehend ein Ersatzgerät und senden Ihnen Portokosten für die Rücksendung in Form von Briefmarken. Bitte senden Sie niemals ein Gerät unfrei zurück.				
wird nach Rückgabe auf Ihr Konto zurückbezahlt.				

BESTELLFORMULAR

Einsenden oder per Fax an: (auch telefonische Beratung & Bestellung)
AUDIVA Uwe Minning, Behlenstr. 3, D-79400 Kandern • Fax & Tel.: siehe unten

Rechnungs- und Lieferadresse

Eine abweichende Lieferadresse bitte auf separatem Blatt angeben.

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Liefertermin: sofort zum:

Datum:

Unterschrift:

Ich wurde empfohlen von einem Akustiker/Therapeut/Arzt: Name und Ort:

.....
 Ich habe mich selbst informiert über Messe Freunde Internet

Ich möchte die kostenfreie Beratung in Anspruch nehmen und unter der oben genannten Nummer angerufen werden.

Einzugsermächtigung

Immer bei Verleih erforderlich bzw. bei Zahlungsweise Bankeinzug

Kontoinhaber:

Name der Bank:

BLZ:

Kontonummer:

Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass mein Konto die Deckung für den Gesamtbetrag aufweist.

Unterschrift Kontoinhaber:

Sicherheitstechnische Fragen (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Anwendung in klinischer Einrichtung, therap. Praxis, Schule,
 zu Hause, andere _____

Für Patienten mit Bewegungsunfähigkeit, Fehlen normaler Schutzreflexe